

# Tube pour tire-lait Maymom®

Convient aux tire-laits Elvie® Stride



## Certificats : Ce produit est conforme


- A. US FDA 21 CFR 177.2600 pour le plastique en contact avec les aliments.  
B. UE SANS BPA (Bisphénol A) : EN 14350-2:2004 Clause 4.8.

## Mode d'emploi

### Nettoyage

Le tube n'est pas stérile mais il est propre. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Le lait n'entrera pas en contact avec le tube.  
La stérilisation n'est pas nécessaire. Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière.

### Installation

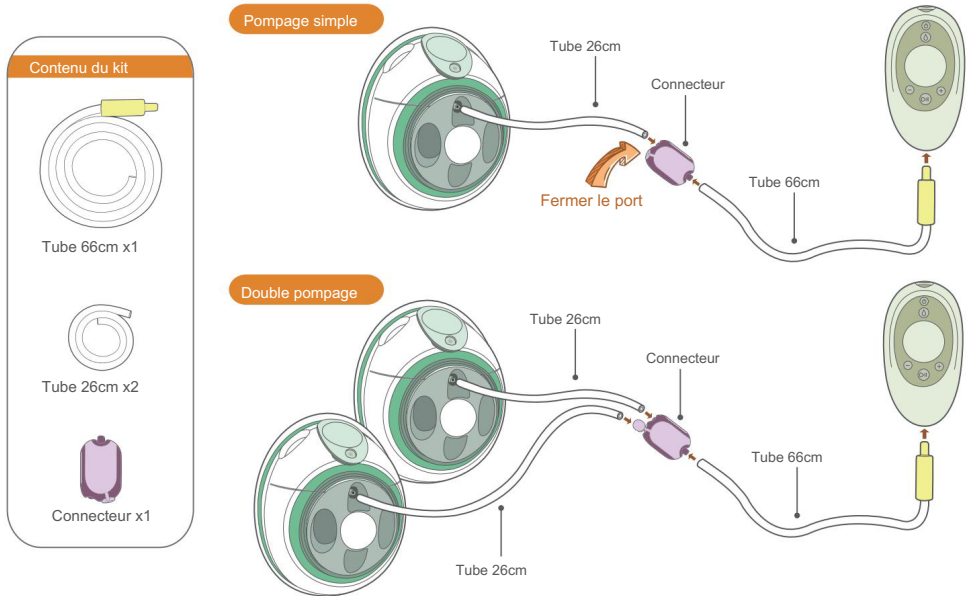

### Dépannage Faible puissance

d'aspiration – De nombreux facteurs peuvent entraîner une faible puissance d'aspiration.  
Veuillez vérifier si le bec de canard (ou la membrane) doit être remplacé ; il y a une fissure dans l'ensemble du système ; il y a des dommages au tube (les animaux domestiques adorent mâcher le tube) ; l'extrémité du tube est desserrée.

### Entretien

Le tube n'est pas un jouet. Gardez le tube hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas le produit dans la voiture pendant une longue période. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager le tube. N'utilisez pas de rayons UV ou de vapeur pour stériliser les pièces.

## Service client Maymom

✉ CS@maymom.com +1  
☎ 919 4535168 <http://>  
🌐 [maymom.com/](http://maymom.com/) Maymom  
🏢 LLC 3 Laurel Leaf  
📍 CT, Durham, NC 27703

Modèle E001  
Matériau Silicone/PP  
Résistant à la chaleur -20°C-120°C  
Durée de conservation 10 ans  
(À l'abri de la lumière directe du soleil)  
Fabricant Date 22 avril 2024

