

Valve à bec de canard

Convient au tire-lait Elvie® Stride



Informations sur le bec de canard

- Lorsque la valve n'est pas utilisée, il peut y avoir une petite ouverture à l'extrémité (< 0,5 mm).

Ce n'est pas un défaut.

Pendant la séance de pompage, la petite ouverture se ferme et s'ouvrira correctement sans impacter la puissance d'aspiration et le débit.

- Ce produit est sujet à l'usure.

Pour des performances optimales, si votre bec de canard n'est pas utilisé mais présente un espace supérieur à 0,5 mm, vous devez le remplacer par un nouveau.

Service client

Maymom SARL

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



http://maymom.com

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Numéro de modèle : E005-2D, 4D, 6D

Matériau : Silicone

Résistant à la chaleur : -10-110° C

Durée de conservation : 10 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Date du fabricant : 16 juillet 2024



AVERTISSEMENT:

RISQUE POTENTIEL

Ce n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



silicone recyclable



Papier d'instructions pour boîte en PP



Petite partie étouffée



Petite partie étouffée

*Elvie est une marque déposée de Chiaro Technology Ltd.

Utiliser

- Avant chaque utilisation, inspectez la valve pour détecter d'éventuelles fissures, éclats, déchirures ou détériorations.

Si cela se produit, cessez de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau.

(Ce produit est sujet à l'usure après une période d'utilisation.)

- N'insérez jamais d'objet dans l'ouverture de la valve pour la nettoyer. Cela pourrait déchirer ou étirer la pièce, ce qui entraînerait une mauvaise performance.

Nettoyage

- PAS de nettoyage au lave-vaisselle.
- Avant la première utilisation, désinfectez avec de l'eau bouillante pendant 3 min ou de la vapeur d'eau pendant 15 min.
- Après chaque utilisation, lavez délicatement les valves à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez pendant 10 à 15 secondes.
- Après chaque utilisation, détachez, lavez à la main et séchez les valves dès que possible pour éviter la formation de moisissures.

Compatibilité



Elvie Stride



Elvie

Dépannage

- Lorsqu'il n'y a pas d'aspiration, vérifiez que l'embout de la valve n'est pas endommagé ou déchiré et qu'il n'y a pas de débris ou de particules étrangères entre les deux lèvres de la valve.
 - Consultez également le manuel Elvie Stride pour plus d'informations.
- Dépannage.