

Inserts de bride

Convient pour Elvie / Elvie Stride Cup 24 mm,
Téterelle PersonalFit Flex de Medela,
Tasses de recueil mains libres Medela



Matériau Silicone pur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C (250 °F)

Durée de conservation 5 ans

(À l'abri de la lumière directe du soleil)

Modèle

**E012-i13/14/15/16/17/18/
19/20/21x2(.g+b+m)**

Date du fabricant

22 août 2024



Installation



Étape 1.

Placez l'insert dans
le tunnel du mamelon de
Elvie/Elvie Stride
Tasse.



Étape 2.


Appuyez autour du
tunnel de mamelon de
l'insert pour s'assurer qu'il
se trouve à plat contre la
coupe Elvie.

Nettoyage

Avant la première utilisation, plongez l'insert dans de l'eau
bouillante pendant 5 minutes. Veillez à ce que
l'insert soit entièrement recouvert d'eau.

Nettoyer à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, puis
sécher à l'air libre après chaque utilisation.

Compatibilité

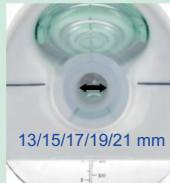


Elvie simple/double électrique



Elvie Stride



Medela PersonalFit Flex
Protège-seins

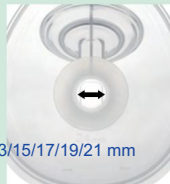

Medela mains libres
Coupes de collection

Dépannage

Inconfort après le pompage –

- Vous pouvez appliquer un peu d'huile de coco
sur le tunnel du mamelon avant de
pomper pour réduire la friction.
Assurez-vous que votre bébé n'est pas
allergique à l'huile de coco.
- Cet insert pourrait ne pas vous convenir.
Demandez l'aide d'une consultante
en allaitement.

Service client

Maymom SARL
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>



Fabriqué à Taiwan

*Elvie est une marque déposée de Chiaro Technology Ltd.

*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse.

Maymom n'est pas affiliée à ces sociétés et n'approuve pas les allégations relatives au
produit et à la compatibilité.