

## Inserts de bride

Convient aux gobelets Freemie® • À utiliser avec les gobelets Freemie de 25 mm



Matériel Silicone pur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C (250 °F)

Durée de conservation 5 ans

(À l'abri de la lumière directe du soleil)

Modèle **F012-i10/13/15/17/19/21x2**

Fabricant Date 12 avril 2024



papier  
d'instruction



silicone  
insérer



Bouteille en PP

## Nettoyage

Placer l'insert dans l'eau bouillante pendant 5 min avant la première utilisation.

Nettoyer à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, puis sécher à l'air libre après chaque utilisation.

### Utiliser



#### Étape 1.

Alignez l'encoche sur l'ouverture d'extrémité de la bride. Insérez l'insert dans le bride jusqu'au bout.



#### Étape 2.

Appuyez sur l'insert pour qu'il puisse reposer à plat contre la paroi de la bride.

### Utiliser



#### Étape 3.

Voir la photo à gauche pour un Insert correctement installé.



#### Étape 4.

Pour supprimer : saisissez UN côté de la zone épaisse (la zone du cou), puis **TOURNEZ** et **TIREZ**.

## Dépannage

1. Aucun lait ne sort – Assurez-vous que l'encoche de l'insert est alignée avec l'ouverture d'extrémité de la bride.

## Dépannage

2. Inconfort après le pompage –
  - a. Vous pouvez appliquer un peu d'huile de coco sur le tunnel du mamelon avant de pomper pour réduire la friction. Assurez-vous que votre bébé n'est pas allergique à l'huile de coco.
  - b. Cet insert pourrait ne pas vous convenir. Demandez l'aide d'une consultante en allaitement.

Consultez également le manuel d'utilisation de Freemie pour plus de dépannage !

## Service client

Maymom, LLC 3  
Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🌐 <http://maymom.com>

Fabriquée à Taiwan



\*Freemie est une marque déposée de Dao Health.  
Maymom n'est pas affilié à Dao Health et Dao Health n'approuve pas le produit et les allégations de compatibilité.