



Tube pour tire-lait Maymom®

Convient aux tire-lait électriques doubles Lansinoh®

maymom®
care for each mom

Certificats : Ce produit est conforme


- A. US FDA 21 CFR 177.2600 pour le plastique en contact avec les aliments.
B. UE SANS BPA (Bisphénol A) : EN 14350-2:2004 Clause 4.8.

Mode d'emploi

Nettoyage

Le tube n'est pas stérile mais il est propre. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Le lait n'entrera pas en contact avec le tube.
La stérilisation n'est pas nécessaire. Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière.

Installation

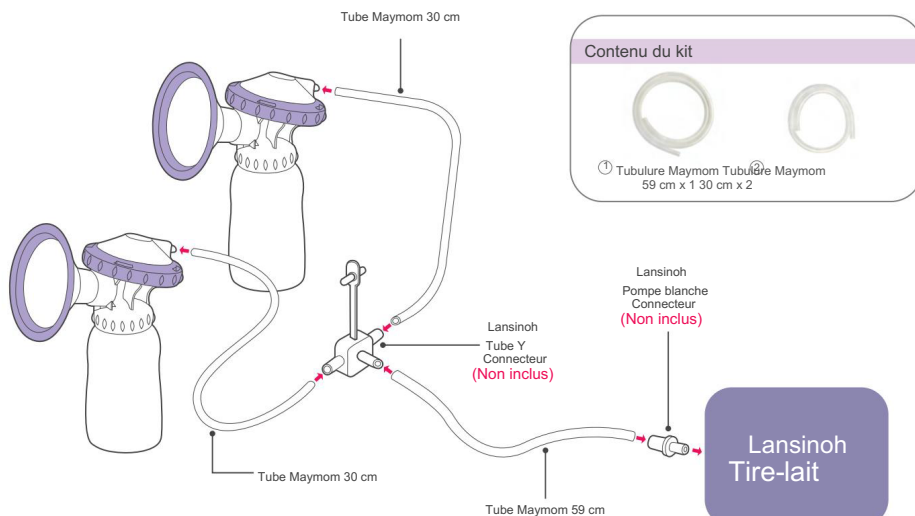

Si l'extrémité du tube se détache après une période d'utilisation, coupez-la.
environ 1/8 de pouce de l'extrémité. Il sera à nouveau comme neuf

Dépannage

Faible puissance d'aspiration –

De nombreux facteurs peuvent entraîner une faible puissance d'aspiration.

Veillez vérifier si

- le bec de canard (ou petite membrane blanche) doit être remplacé ;
- il y a une fissure dans l'ensemble du système ;
- le diaphragme blanc du dispositif anti-retour se déplace librement de haut en bas ;
- il y a des dommages au niveau du tube (les animaux domestiques adorent mâcher le tube) ;
- L'extrémité du tube est lâche.

Soins

Le tube n'est pas un jouet. Gardez le tube hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas le produit dans la voiture pendant une longue période. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager le tube.
N'utilisez pas d'UV, de vapeur pour stériliser les pièces.

Service client Maymom

+1 919 4535168

CS@maymom.com

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Modèle L001

Matériau Silicone

Résistant à la chaleur -20°C-120°C

Durée de conservation 10 ans

(À l'abri de la lumière directe du soleil)

Fabricant Date 22 avril 2024



Ne pas utiliser
sac à vapeur



Ne pas utiliser d'UV



Prévenir
mordre un animal de compagnie

Connecteurs de tubes



Nettoyage

Le tube n'est pas stérile mais il est propre.

Vous pouvez l'utiliser tel quel. Le lait n'entrera pas en contact avec le tube. La stérilisation n'est pas nécessaire.

Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière.

Modèle EH : L002 EAN 4713530093676

IX002LLXGDFIÎ

X002LLXGDF

Schéma de connexion

Double pompage



Pompage simple

