



Vanne Maymom

Convient aux tire-lait Lansinoh®

Instructions

Avant la première utilisation :

Nettoyez la valve dans de l'eau bouillante ou de la vapeur pendant 3 à 5 minutes.



Après chaque utilisation :

- Détachez, lavez délicatement à la main avec de l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez à l'air libre dès que possible pour éviter la formation de moisissures.
- PAS de nettoyage au lave-vaisselle

Suppression:

- Lorsque vous retirez la valve de la bride, ne la saisissez JAMAIS par sa fine ouverture.
- Maintenez la valve le plus près possible de sa base.

De cette façon, vous n'endommagerez pas la zone fragile de la valve.

Nettoyage:

N'insérez jamais d'objet dans l'ouverture de la valve pour la nettoyer. Cela pourrait déchirer ou étirer la pièce, ce qui entraînerait une mauvaise performance.





Dépannage

- Lorsqu'il n'y a pas d'aspiration, vérifiez que l'embout de la valve n'est pas endommagé ou déchiré et sans débris ni particules étrangères entre les deux lèvres. Même un petit cheveu entraînera une perte de puissance d'aspiration.
- Il est toutefois acceptable de voir une petite ouverture à l'extrémité lorsque la valve n'est pas utilisée.

Caractéristiques

Ce produit est conforme aux normes de la FDA pour le plastique en contact avec les aliments.
Les rapports sont disponibles en ligne.



Matériau : Silicone

Numéro de modèle : L005

Durée de conservation : 10 ans

Date du fabricant : 9 août 2024

Fabriqué à Taiwan

Service client

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



**WARNING:
CHOKING HAZARD**

Small parts.
Not for children under 3yrs.



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**

This is not a toy,
keep it away from children.

*Lansinoh est une marque déposée de Lansinoh Laboratories, Inc.
Maymom n'est pas affilié à Lansinoh et Lansinoh n'approuve pas le produit.