


Kit de bride MyFit^{MT}



Compatibilité des connecteurs

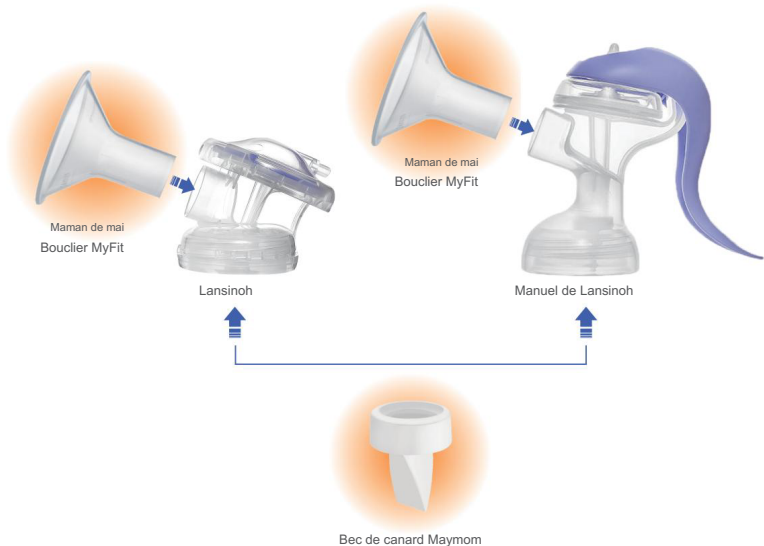

Pompe compatible



- Enregistré auprès de la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe II, kit tire-lait.
Numéro d'enregistrement D192499.
- Conforme aux exigences de la FDA pour les conteneurs en contact avec les aliments
(21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Sans BPA (EN 14350-2:2004 Clause 4.8.)



Nettoyage

Avant le nettoyage, détachez le blindage du connecteur de base.

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincez.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.



Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord du pot sans eau surchauffera et fera fondre le plastique.

Après chaque utilisation :

- Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède. Sécher complètement à l'air libre.

Lavable au lave-vaisselle UNIQUEMENT sur le panier supérieur.



Démonter les pièces avant la stérilisation

Élimination du bec de canard



Maintenez les deux côtés plats du bec de canard près de la base



Pousser latéralement

NE PAS tirer tout droit



NE PAS

tirer les pointes fines

Service client

✉ CS@maymom.com

🌐 <http://maymom.com/>

☎ +1 919 4535168

📍 Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Informations sur le produit

Modèle **LP012-F**Dx2**

Matériel Polypropylène, Silicone

Résistant à la chaleur 110° C (230° F)

Durée de conservation : 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Fabricant Date 6 mars , 2024

