

Tube pour tire-lait Maymom®

Convient aux tire-laits Medela Swing

1. Pour l'utiliser, connectez l'extrémité triangulaire du Connecteur le tube à la machine et l'autre extrémité à la tétérèlle et allumez la pompe.

Assurez-vous que le bord du connecteur du tube est invisible après l'insertion dans la pompe.


2. NE PAS nettoyer le tube à la vapeur ou eau bouillante. Laver à l'eau froide/tiède. Pour sécher, connectez une extrémité du tube au tire-lait et laissez l'autre extrémité non connectée.

Allumez le tire-lait jusqu'à ce que le tube soit sec. Si une stérilisation est nécessaire, veuillez utiliser le sac Micro-Steam de Medela et suivre très attentivement ses instructions ou utiliser des méthodes de stérilisation à l'eau froide, par exemple Milton.

3. Dans de rares cas ou après de longues périodes d'utilisation, le tube peut se détacher du connecteur. Veuillez couper 0,3 cm de l'extrémité du tube, puis réinsérer le connecteur dans le tube. Vous ne pourrez peut-être pas enfoncer complètement le connecteur dans le tube, mais il restera scellé.

Installation de la tubulure Maymom sur une pompe Medela Swing

➤ Poussez le connecteur dans la machine jusqu'à ce que le bord du connecteur ne soit plus visible.

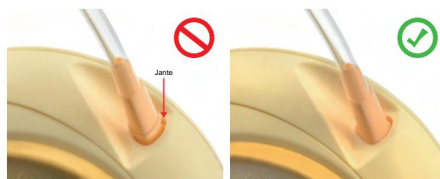

Le bord est toujours visible. Une perte de puissance d'aspiration de 30 % se produira.

La jante est complètement à l'intérieur de la machine. Installation correcte !

Certification

- A. Directive 2008/39/CE de la Commission européenne relative à la sécurité alimentaire (2002/72/CE) ;
- B. Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) de l'UE pour l'entrée du connecteur matériel;
- C. Directive européenne sur les métaux lourds EN71Partie 3:1994 pour les tubes en PVC ;
- D. Test européen sans BPA (bisphénol A) ; EN 14350-2:2004 Article 4.8.

Fabricant : Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, chemin ChungCheng. Zhunan, comté de MiaoLi Taiwan

<http://maymom.com>

Importé par Maymom LLC

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703 États-Unis

Des questions ? Envoyez un e-mail à CS@maymom.com Appelez le +1 919 4535168

Visitez : <http://www.maymom.com/> pour d'autres produits Maymom (membranes, valves, tétérèlles et adaptateurs de sacs à lait pour pompes Swing !

Matière : PVC

Numéro de modèle/numéro de lot : M010-Swing/sur l'emballage

Date de fabrication : 12 juillet 2024

Expiration : 10 ans à compter de la date de fabrication

maymom®
care for each mom

*Medela et Swing sont des marques déposées de Medela Holding AG, Suisse.
Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit.

