

Ensemble de tubes Maymom®

Convient au tire-lait Swing-maxi de Medela

1. A. Ce kit de tubulures est conçu uniquement pour la pompe Medela Swing-maxi. Bien qu'il soit également compatible avec la pompe Medela Swing, cette application n'est pas recommandée. B. Bien que notre produit ne ressemble pas au kit de tubulures OEM de Medela, une compatibilité à 100 % dans ses fonctionnalités est garantie ou vous serez remboursé !

2. Certificats : Ce produit passe

- A. Directive 2008/39/CE de la Commission européenne relative à la sécurité alimentaire (2002/72/CE) ;
- B. Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) de l'UE pour le matériau d'entrée PP ;
- C. Directive européenne sur les métaux lourds EN71Partie 3:1994 pour les tubes en PVC ;
- D. UE sans BPA (Règlement de la Commission européenne n° 10/2011)



3. Pour un pompage double face, connectez les segments les plus courts (B) du

Raccordez le tube aux connecteurs de la tétérèle et le segment le plus long (A) à votre tire-lait et allumez la pompe. Pour un pompage unilatéral, scellez l'un des segments les plus courts (B) à l'aide du capuchon en caoutchouc fourni.



Remarque : si vous ressentez une augmentation de la puissance d'aspiration lorsque vous effectuez un pompage unilatéral, ajustez le réglage de puissance de la machine pour votre confort.

4. Lavez à l'eau chaude savonneuse. Si une stérilisation est nécessaire, faites couler une cuillerée d'alcool à friction à travers le tube ou utilisez un sac Micro-Steam de Medela et suivez EXACTEMENT ses instructions. Pour sécher, connectez une extrémité du tube au tire-lait et laissez les deux autres extrémités non connectées. Allumez le tire-lait jusqu'à ce que le tube soit sec.

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf ct, Durham, NC 27703 États-Unis

Question?

Appelez le 1-919-453-5168

Envoyez un courriel à CS@maymom.com

Matériau : Silicone/PVC, PP (matériau sans BPA)

Numéro de modèle/numéro de lot : M015-MAXI-silicone

Date de fabrication : 4 juin 2024

Expiration : 10 ans à compter de la date de fabrication

Visitez www.maymom.com pour plus de produits :



maymom®
care for each mom