

Tube pour tire-lait Maymom®

Convient au tire-lait Medela Swing Maxi Flex

maymom®
care for each mom



Certificats : Ce produit est conforme

- A. US FDA 21 CFR 177.2600 pour le plastique en contact avec les aliments.
B. UE SANS BPA (Bisphénol A) : EN 14350-2:2004 Clause 4.8.

DE MODÈLE N° : M115-Maxi-pvc

IXOÇ!tÈJOL1gÎ

X00184JOL1


Mode d'emploi

Nettoyage


Le tube n'est pas stérile mais il est propre. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Le lait n'entrera pas en contact avec le tube.
La stérilisation n'est pas nécessaire. Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière.

Installation

Double pompage

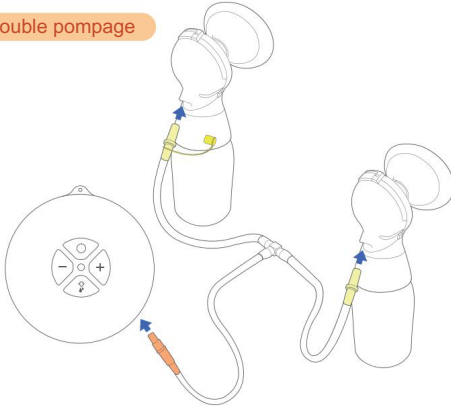

Pompage simple

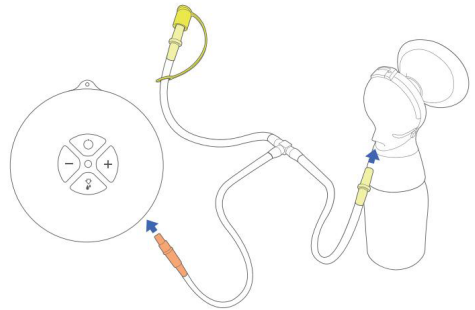

Pompes compatibles



Medela Swing Flex

Dépannage Faible puissance

d'aspiration – De nombreux facteurs peuvent entraîner une faible puissance d'aspiration.
Veuillez vérifier si

la membrane en silicone de l'intérieur du connecteur de la bouteille doit être remplacée ; il y a une fissure dans l'ensemble du système ; il y a des dommages au tube (les animaux adorent mâcher le tube) ; l'extrémité du tube est desserrée.

Soins

Le tube n'est pas un jouet. Gardez le tube hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
N'utilisez pas de rayons UV ou de vapeur pour stériliser les pièces.



N'utilisez pas de sac à vapeur



Ne pas utiliser d'UV



Prévenir mâcher un animal de compagnie

Service client

CS@maymom.com http://
maymom.com/ +1 919
4535168 Maymom,
LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Modèle M115-Maxi-pvc

Matériel PVC, PP

Résistant à la chaleur jusqu'à 110 ° C (230 ° F)

Durée de conservation 10 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)



WARNING: CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3yrs.



WARNING: POTENTIAL HAZARD
This is not a toy,
keep it away from children.