

# Tube pour tire-lait Maymom

- Compatible avec le tire-lait électrique Medela Old Freestyle pour se connecter

Connecteur Medela Freestyle Flex

Matériel	PVC, PP
Résistant à la chaleur	-10~75°C (15~170°F)
Durée de conservation	10 années (À l'abri de la lumière directe du soleil)
Fabricant Date	20 mars 2023

Numéro de modèle : M211-Fscf (Maymom)

EH FNSKU

Code UPC 4713530093133

(X002HAA8KJ)

## Soins

Le tube n'est pas un jouet. Gardez le tube hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne laissez pas le produit dans la voiture pendant une longue période.

Les conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les tubes.

N'utilisez pas de sac à vapeur UV, à vapeur ou à micro-ondes pour stériliser les pièces.


## Utiliser

Pour un pompage double, connectez le tube aux deux ensembles de pompes.

Pour un pompage unique, placez le capuchon sur l'une des extrémités du tube pour bloquer le passage de l'air et ajustez le réglage de puissance plus bas sur la machine pour votre confort.



## Installation

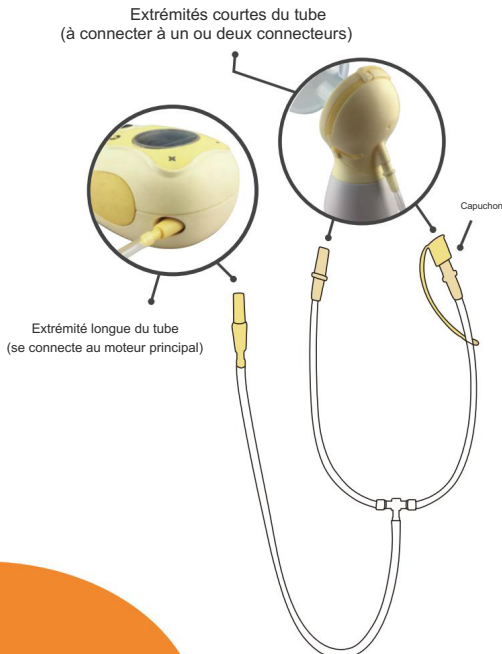

## Nettoyage

Le tube n'est pas stérile mais il est propre. Vous pouvez l'utiliser tel quel.

Le lait n'entrera pas en contact avec le tube. Stérilisation

n'est pas nécessaire. Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière o.

## Dépannage

Faible puissance d'aspiration–

Il y a une fissure dans tout le système ;

Réglez la puissance de la machine selon votre confort ;

Le tube n'est pas bien inséré dans le moteur principal et le connecteur PersonalFit Flex ;

C'est un dommage. (les animaux adorent mâcher les tubes) ;

Consultez également le manuel Medela pour plus de détails sur le dépannage.

## Service client

✉ CS@maymom.com

🌐 <http://maymom.com/>

☎ +1 919 4535168

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse.

Maymom n'est pas affiliée à Medela. Medela ne fait pas la promotion des produits Maymom.