

Pièces de tubulure Maymom®

Convient aux tire-lait Philips Avent Comfort

1. Tire-laits applicables : tire-lait Philips Avent Comfort, tire-laits électriques simples et doubles
2. Certificats : Ce produit est conforme à la directive 2008/39/CE (2002/72/CE) de la Commission européenne sur la sécurité alimentaire ; B. Tests de silicone de qualité alimentaire ; C. Test sans BPA (bisphénol A) de l'UE ; EN 14350-2:2004 Clause 4.8.
3. Pour l'utiliser, connectez une extrémité du tube au capuchon de la tétérrelle et l'autre extrémité au tire-lait.
4. Nettoyez et stérilisez le tube à la vapeur d'eau ou à l'eau bouillante pendant 3 à 5 minutes selon les besoins. Pour le sécher, raccordez le tube au tire-lait et laissez l'autre extrémité (avec l'adaptateur) non raccordée. Allumez le tire-lait jusqu'à ce que le tube soit sec.

Marketing : Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 États-Unis Des questions ?

Envoyez un courriel à CS@maymom.com

Appelez le 919 4535168

Matériau : Silicone ; sûr entre -20 ° C et 120 ° C

Numéro de modèle/numéro de lot : P001

Date de fabrication : **4 mars 2024**

Expiration : 10 ans à compter de la date de fabrication

Maymom s'engage à fabriquer des produits de haute qualité à un prix raisonnable. Notre gamme de produits compatibles Philips Avent comprend des becs de canard pour tire-lait et un kit de conversion pour biberon Avent à utiliser avec d'autres tire-lait (par exemple Medela, Ameda). Veuillez visiter notre site Web (www.maymom.com) pour découvrir d'autres produits connexes !

maymom®
care for each mom

