

Kit tire-lait Maymom®

Convenit à la pompe Avent* Comfort



Merci d'avoir choisi le kit de tire-lait Maymom® pour votre tire-lait Avent.

Maymom est votre solution de haute qualité, sûre et abordable pour répondre à vos besoins en matière d'accessoires de tire-lait.

Contenu du kit

1. Valve à bec de canard
2. Coussin de massage
3. Bride
4. Membrane d'aspiration
5. Capuchon supérieur
6. Tube

Certificats : Enregistré


après de la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe II,

Kit tire-lait. Numéro d'enregistrement D192499.

Conforme aux exigences de la FDA pour les contenants en contact avec

les aliments (21CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)

Sans BPA (EN 14350-2:2004 Clause 4.8.)

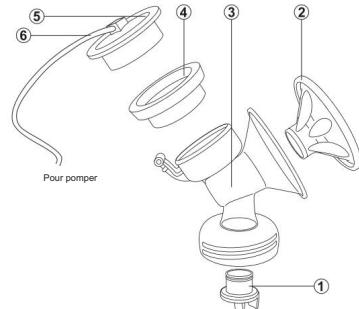

Mode d'emploi

Nettoyage (tout sauf les tubes, qui n'ont peut-être pas besoin d'être nettoyés du tout) :



Numéro d'enregistrement D192499

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède. Faites bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 à 4 minutes.

Après chaque utilisation,

Démonter, nettoyer et rincer les pièces à l'eau tiède. Sécher à l'air libre.

Installation:

Poussez doucement et symétriquement les pièces les unes sur les autres selon le schéma ci-dessus

Saisissez la tige latérale du bec de canard lors de l'installation/retrait. Évitez de toucher sa pointe fragile.

Dépannage

Lorsqu'il n'y a pas

d'aspiration, veuillez vérifier les points suivants :

- (A) Coussin de massage et bec de canard correctement installés ?
- (B) La pompe fournit-elle une aspiration à la bride ?
- (C) Y a-t-il un trou dans le tube (les animaux adorent mordre les tubes !)
- (D) Bec de canard déchiré ?

Service client : 3 Laurel

Leaf CT, Durham, NC 27705 USA

CS@maymom.com, Tél. : 919 4535168



Le sac en plastique n'est pas un jouet.

Jeter après ouverture.

Modèle : P012-F25PVUCT

Code UPC 076048888290

*Avent est une marque déposée de Koninklijke Philips NV. Maymom n'est pas affiliée à Philips et Philips n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.