

**maymom**<sup>®</sup>  
care for each mom

## Inserts de bride

Compatible avec Medela® / Spectra®

Brides de 24 mm



Matériau Silicone pur  
résistant à la chaleur 120°C (250°F)

Durée de conservation 5 ans

(À l'abri de la lumière directe du soleil)

Modèle **X012-i10/13/15/17/19/21x2**  
**X012.2G-i14/16/18/20x2**

Date du fabricant 3 JUILLET 2024



### Utiliser



#### Étape 1.

Alignez l'encoche sur l'ouverture d'extrémité de la bride. Insérez l'insert dans le bride jusqu'au bout.



Presse



#### Étape 2.

Avec un pouce de l'une de vos mains, poussez sur la grande extrémité de l'insert dans un bouclier Medela de 24 mm, insérez un doigt de l'autre main dans la petite extrémité de l'insert pour le guider afin qu'il glisse dans le bouclier.

Poussez une section du cercle à la fois et complétez le cercle entier jusqu'à ce que l'insert soit correctement installé.

### Utiliser



10/13/15/17/19/21 mm



Torsion

#### Étape 3.

Voir la photo à gauche pour un Insert correctement installé.

#### Étape 4.

Pour retirer : saisissez UN côté de la zone épaisse (la zone du cou), puis **TOURNEZ** et **TIREZ**.

## Nettoyage

Placez l'insert dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes avant la première utilisation. Assurez-vous que l'insert est entièrement recouvert d'eau.

Nettoyer à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, puis sécher à l'air libre après chaque utilisation.

## Dépannage

Inconfort après le pompage –

- Vous pouvez appliquer un peu d'huile de coco sur le tunnel du mamelon avant de pomper pour réduire la friction. Assurez-vous que votre bébé n'est pas allergique à l'huile de coco.
- Cet insert pourrait ne pas vous convenir. Demandez l'aide d'une consultante en allaitement.

## Service client

Maymom, LLC  
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🌐 <http://maymom.com>



Fabriqué à Taiwan

\*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit.

\*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à eux et n'approuve pas les produits de Maymom ni leurs allégations de compatibilité.